




日進ゴムのソックスエイド

自力[®]で履けルンです！


人工関節置換手術などにより、股関節・膝関節の可動域の低下が原因で、靴下を履くことが困難な方や高齢者向けの自助具です。

確実に履けるソックスエイド

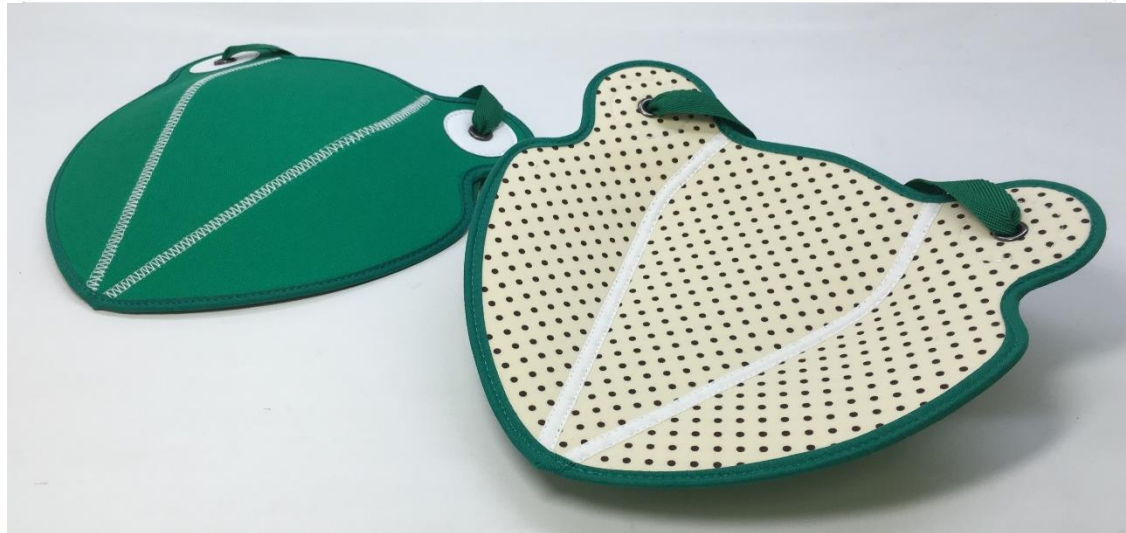

■履物のインソール技術を採用し、靴下の確実な装着と使用時における快適さを追求しました。

●軟らかい素材で安心…履物のインソール技術で培った、しなやかで軟らかい素材を採用。従来市販されているプラスチック製とは違い、装着時に足を傷つける事はありません。また装着時の不快な冷たさありません。●持ち運びが可能…軟らかい素材ですので、簡単に曲げてコンパクトに収納できます。旅先や外出先への持ち出しが可能。また、折れたり割れたりする事ありません。●濡れた足でもスムーズな足通り…表面のメッシュ素材により、夏場の蒸れる時期にも簡単に装着出来ます。

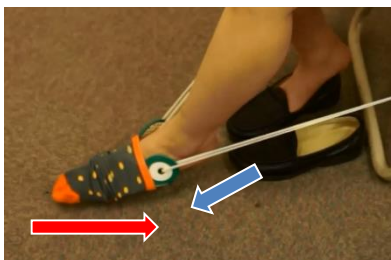

ソックスエイドを丸め、靴下をクビレ部分まで装着します。つま先をソックスエイドの中に滑り込ませます。



付属の紐をゆっくり手前に引っ張ります。靴下がかかと部分を通過したら紐を上部へ引っ張り上げます。